


SPY-PHI ARM

Changing the way you see your patients




SPY-PHI ARM取り付け方法


※ご使用前に必ず洗浄・滅菌をして下さい。また破損の有無をご確認下さい。

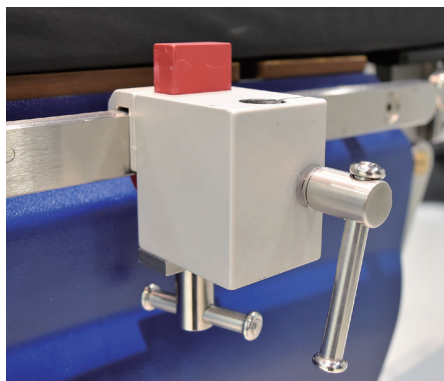

1. テーブルクランプ (HH1002) を緩め (左回し)、ベッドレールに取り付けてください。赤いLブラケットの爪が下になるよう設置し、しっかりと固定されているかご確認ください。

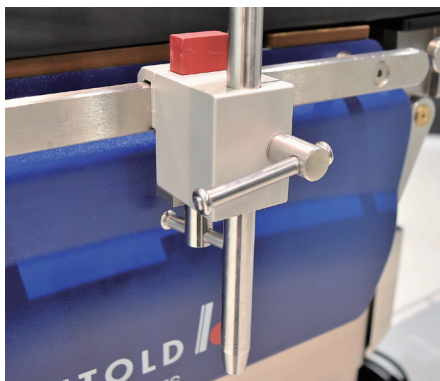

2. メインアーム (HH1001) をテーブルクランプに差し込み、テーブルクランプのハンドルをしっかりと締めてください (右回し)。

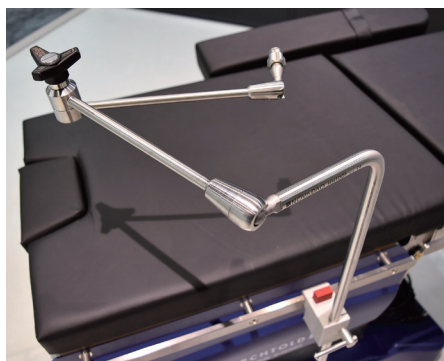

3. メインアームの遠位端を保持しながら位置を調整し、黒いハンドルを締めてください (右回し)。システム全体が固定されているかご確認ください。



4. イメージングヘッドホルダー (HH1003) を取り付け、ダイヤルをLock方向に締めます。※取り付け前にはダイヤルがUnlockされているかご確認ください。



5. ドレープで覆った SPY-PHI をホルダーに設置し、ノブを締め固定します。※設置の際は、イメージングヘッドホルダー (HH1003) の製品番号が記載されている側に SPY-PHI のレンズ面が向くように設置します。

分解するには上記の逆の手順をおこなってください。

	カタログ番号	製品名
詳細	HH1001	SPY-PHIアーム メインアーム
	HH1002	SPY-PHIアーム テーブルクランプ
	HH1003	SPY-PHIアーム イメージングヘッドホルダー
セット	HH1001-SET	SPY-PHIアーム セット

医療機器届出番号	販売名
13B1X10209000918	SPY-PHI アーム

※本品 SPY-PHI ARM には、内視鏡及び SPY-PHI は含まれておりません。

このカタログは、器械の適正使用のために添付文書・取扱説明書の内容を補足しております。ただし、抜粋であり、全ての内容を網羅していない為、必ず添付文書・取扱説明書を御一読ください。

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されています仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-150
HS/SE 0m 11/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/