

Stryker surgical committed to your success.

Flyte® Steri-shield®

フライト パーソナル・プロテクション・システム



- ▶ 手技を妨げない軽い装着感
- ▶ 術者由来の飛散物を低減し患者を保護
- ▶ 長時間術者を守る AAMI レベル 4





感染防止

術者の上半身すべて覆ってしまうことで、患者、医療従事者、双方の感染を防止



感染性体液の浸透防止

AAMI で最高の液体防御性のレベル 4 を満たしたガウンは、長時間、術野血や術者の汗の浸透を防ぎます



微生物、飛散微粒子の遷移防止

術者頭部を継ぎ目なく覆うので、バイザーと帽子の組合せと違い、完全な隔離ができます



フィルター+ファンの換気システム



広い視野のクリアシールド



マグネットで簡単装着



AAMI レベル4の液体防御性能



3層構造の軽量で動きやすい生地



フライト ヘルメット

• Comfortable 手技のしやすさ

術中の下向き姿勢に最適化された重量バランスヘルメット、バッテリーともに、当社製品で歴代最軽量

• New technology あらたな提案

Hip など横視野の術式で便利な、明るい LED バッテリーライトと軽量 Li-ion バッテリーの組合せ 60,000 Lux、5,575 Lumen/sq ft

• Low cost of ownership 互換性

チャージャーモジュールの交換で、T5 システムの充電もできるので混在使用も可能

• Personalization お好みに合わせて

スタンダード・LED バッテリーライト・ファイバーオプティックライトの3種のヘルメット、T4/T5 より 20% 広い異型レンズ、マグネットのクイックレンズ固定メカニズム、頭周・深さの広い調整幅

*最大風量での稼働時間






現代の人工関節手技に適したシステム

- 軽量のヘルメットシステムに、高機能アウトドアウェアと同じで、薄さ・防水性・蒸散性を両立した、3層生地のガウン・システム
- 広い視野で、直下の術野が見やすく、ナビゲーション利用でも困らないワイド異型レンズと、瞬時に汚れた視界を回復できるピールアウェイ機能
- お好みで選べるディスプレイブルガウンは、それぞれに幅広い体格に合うサイズをラインナップ。ヘルメットは従来品より幅広い頭部形状に対応
- 整形症例で必要な稼働時間に最適化された軽量 Li-ion バッテリー
- 清潔操作のため、視界内の顎に移動した操作ボタン
- 交換修理ができるバッテリーホルダ

Choice!!

選べるステリシールド。3 タイプの形状から、お好みで選べます。
さらに、当社独自のピールアウェイも選べます。



形状	シリーズ名	フライトサージクール™
シリーズ特徴		AAMI レベル 4 に対応ながら薄い生地を頭部にも採用。 より良い装着感のため、通気の良い生地を頭部に採用。涼しく、静かで、対話もしやすい。
フード + Peel Away		いつものサージカルガウンと併用して、低コストにステリシールドを利用可能。 装着は簡単で、ワンサイズで体格を選びません。T4/T5 より 20% も広いワイドレンズや、マグネット式装着はガウンと全く同じ。
ガウン プルオーバー		筒状で裏返しのできる手順で着用するので、少ない介助で装着できる。 薄くて動きやすいのに、AAMI で最高のレベル 4 の防水性で、長時間患者・術者を守り、頭頂から足元に続く排気で高い快適性。
ガウン ジッパー + Peel Away		背面をジッパーで締めるだけなので、介助が受けられるなら、簡単に装着できる。 ガウンのメリットに加え、ピールアウェイも選択できるので、ステリシールドの最高機能の組合せを利用可能。

飛散物を多く受ける執刀医に最適なピールアウェイ™


2 枚のクリアフィルム+レンズ。拭いても落ちない油脂汚れも、剥がすと一瞬で、2 回までクリアな視界を回復



頭周と深さの調整




視界内のスイッチ

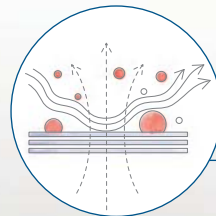

風、液体を通さない
蒸気を通す



従来品より 20% 広い
ワイドレンズ

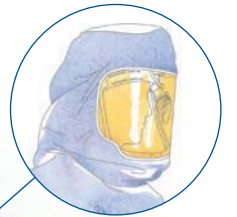

すべての関節置換術に応えるために AAMI レベル4 ガウン

AAMI バリアレベルとは、手技のリスクに必要な安全性を明快な規格にしたものです。

AAMI PB70 バリア性能	予想される曝露レベル			代表的な手技
	液体浸漬	飛散・噴出	ガウン・ドレープへの荷重	
レベル 1	極小	極小	極小	簡単な切除生検・こぶ・肉芽切除・眼手術・耳鼻咽喉手術
レベル 2	少ない	少ない	少ない	アデノイド切除や扁桃摘出・消化器系鏡視術・簡単な整形手術(駆血併用)・開腹ヘルニア修復術・低侵襲手術・IVRやカテーテル術
レベル 3	ある	ある	ある	乳房切除術・関節鏡・膀胱鏡(TURP など) 消化器・泌尿器・生殖器の手術
レベル 4	多い	多い	多い	術者の手や腕を体腔内に入れる手技。整形手術・ 心血管・胸部開胸術・外傷処置・帝王切開

フライトシステム・ガウンはレベル 4

AAMI TIR 11:2005 Selection and Use of Protective Apparel and Drapes in Health Care Facilities
Table 3 - General relationships between barrier performance and anticipated exposure risks

Ordering information

ディスプレイザブル

フライトサージクール		
カタログ番号	製品名	規格
0408-801-400	フライト サージクール フード	28枚入 裾長タイプ
0408-801-500	フライト サージクール フード ピールアウェイ	28枚入 裾長タイプ
0408-721-000	フライト サージクール ガウン プルオーバー	ラージ 11枚入
0408-731-000	フライト サージクール ガウン プルオーバー	X ラージ 10枚入
0408-741-000	フライト サージクール ガウン プルオーバー	2X ラージ 9枚入
0408-821-000	フライト サージクール ガウン ジッパー	ラージ 9枚入
0408-831-000	フライト サージクール ガウン ジッパー	X ラージ 9枚入
0408-841-000	フライト サージクール ガウン ジッパー	2X ラージ 8枚入
0408-821-100	フライトサージクールガウンジッパーピールアウェイ	ラージ 9枚入
0408-831-100	フライトサージクールガウンジッパーピールアウェイ	X ラージ 9枚入
0408-841-100	フライトサージクールガウンジッパーピールアウェイ	2X ラージ 8枚入

ハードウェア

カタログ番号	製品名	規格
フライト ヘルメット		
0408-600-000	フライト ヘルメット	
0408-635-000*	フライト ヘルメット	ファイバーオプティック付
0408-645-000*	フライト ヘルメット	バッテリーライト付
アクセサリ		
0408-210-000	フライト 汗止めバンド	8セット入
0408-655-002	フライト バッテリーチャージャー	100 ボルト
0408-660-000*	フライト バッテリーパック	ロングライフ



バッテリーチャージャー

医療機器届出番号 販売名
* 13B1X10209000781 ストライカー社 パーソナルプロテクションシステム

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: IT1-104
YN/MI 2m 03/09

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/